


UriDoctorVet

URINÁLISE

EQUIPAMENTO PORTÁTIL
PARA LEITURA AUTOMATIZADA
DAS TIRAS DE URINA

Acesse aqui
nosso Guia
de Coleta
de Urina

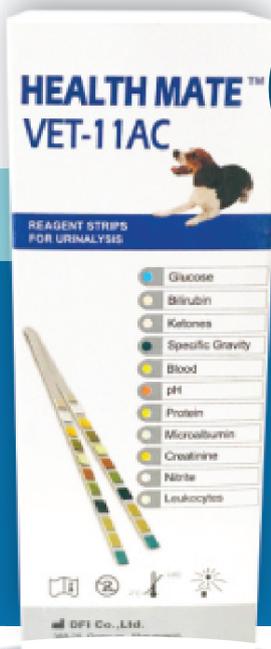

TIRAS DE URINA - HEALTH MATE 11AC

As tiras de urina Health Mate 11AC foram desenvolvidas exclusivamente para o mercado veterinário.

A tira contém **todos os parâmetros tradicionais**: Glicose, Corpos Cetônicos, Sangue, Bilirrubina, pH, Densidade, Nitrito, Leucócitos e Proteínas. Além da **determinação de Creatinina e Microalbuminúria**.

Através dessas dosagens especiais feitas pela tira, é possível **calcular a relação Proteína/Creatinina** diretamente na tira de urina.

Quando os rins de cães e gatos funcionam adequadamente, as proteínas que passam pela filtração são, em sua maioria, reabsorvidas pelos túbulos renais.

Considerando que praticamente não há reabsorção tubular de creatinina em cães e gatos, bem como o fato da excreção de creatinina ser bastante estável, a razão proteína/creatinina é usada como indicador de perda de proteína na urina corrigindo a variação da densidade da urina e auxiliando na confirmação de proteinúria renal.

Devido à dosagem da Microalbuminúria o teste consegue ter uma sensibilidade maior do que os métodos tradicionais (que dosam somente concentrações mais altas de proteínas, perdendo sensibilidade) dando ainda mais relevância clínica ao teste urinário e à razão P/C.

Isso faz com que as tiras Health Mate 11AC sejam um dos métodos mais simples e baratos da avaliação renal em pacientes veterinários com enorme sensibilidade.

O equipamento UriDoctor permite a padronização da leitura das tiras e consequentemente garante melhores resultados.


A única coisa que o operador tem de fazer é mergulhar a tira na amostra de urina e colocá-la no equipamento.

➤ Padronização da leitura;


➤ Funcionamento a pilhas ou carregador.



Passo 1

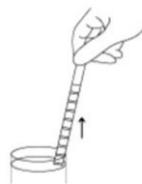

Passo 2

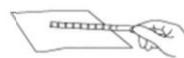

Passo 3



Passo 4